

## ACERIN plastry na odciski z kwasem salicylowym 6 sztuk



Cena: 7,55 pln

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	6 szt.
Postać	plast.
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

## Opis produktu

## ACERIN plastry na odciski z kwasem salicylowym 6 sztuk

Acerin, plastry na odciski z centralnym dyskiem wykonanym z pianki polietylenowej działają wygładzająco i ochronnie. Dzięki zawartości kwasu salicylowego zmiękczej skórę, dzięki czemu zapewniają szybkie i bezbolesne usunięcie nagiotka. Dodatkowo piankowy dysk zabezpiecza odcisk przed tarcieniem i uciskiem.

## Zastosowanie

Wyrób medyczny Acerin przeznaczony jest wspomagająco w leczeniu nagiotków (odcisków).

## Sposób użycia

Przed aplikacją należy dokładnie oczyścić, a następnie osuszyć miejsce, na którym zamierzamy przykleić plaster. Pozwoli to na zapewnienie jak najlepszego przylegania wyrobu.

Należy usunąć zabezpieczenie ochronne i przyłożyć plaster w taki sposób, aby odcisk znalazł się pod nim.

Plaster powinien być zmieniany codziennie.

## Składniki

Pianka polietylenowa, 35-40% kwasu salicylowego.

## Przeciwwskazania

Nie używać wyrobu na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

Nie stosować jeżeli doszło do zaczerwienienia, zapalenia lub zranienia skóry. W przypadku pojawienia się uczulenia bądź alergii – natychmiast przerwać stosowanie.

Pacjenci chorujący na cukrzycę, osoby z problemami z krążeniem krwi, kobiety w ciąży i w trakcie laktacji oraz dzieci do 16. roku życia przed zastosowaniem wyrobu powinny zasięgnąć porady lekarza.

#### Ważne wskazówki

Wyrób przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.

Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł wilgoci i światła, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

#### Ostrzeżenia

Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż przez 2 tygodnie.

#### Dodatkowe informacje

Opakowanie zawiera 6 sztuk plastrów pakowanych osobno, o wymiarach: 72 x 19 mm.

#### Producent

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

Pabianice 95-200