

# CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY naramienny CONTROLY B07



Cena: 104,36 pln

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

## Opis produktu

Produkt medyczny testowany klinicznie  
CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY naramienny CONTROLY B07

Ciśnieniomierz Automatyczny B07 jest w pełni automatycznym na-ramiennym aparatem do pomiaru ciśnienia krwi u osób dorosłych w domu, w gabinecie lekarskim lub pielęgniarskim.

Umożliwia szybki i wiarygodny pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi oraz pulsu za pomocą metody oscylometrycznej.

Aparat oferuje zatwierdzoną klinicznie dokładność i został zaprojektowany w sposób przyjazny dla użytkownika

Uwaga: Urządzenie nie jest przeznaczone do użycia u noworodków i niemowląt.

Wyposażenie zestawu: 1 x aparat, 1 x mankiet, 1 x pokrowiec, 1 x sztywne pudełko z zamknięciem magnetycznym, 1 x instrukcja obsługi w języku polskim, 1 x karta gwarancyjna, 4 x baterie AAA

Funkcje modelu B07:

- Sprawdzanie nieregularnego pulsu (funkcja A-rhythm)
- Funkcja średniej
- Wskaźnik ruchu ciałem (funkcja MotionSense)
- Pamięć 180 pomiarów (po 80 dla każdego z 2 użytkowników)
- Graficzna klasyfikacja ciśnienia wg skali WHO
- Wyświetlanie daty i czasu
- Gniazdo zasilacza sieciowego do którego pasuje każdy kabel micro USB
- Wskaźnik naładowania baterii

Funkcja oszczędzania baterii. Po 1 minucie bezczynności aparat wyłącza się automatycznie  
Mankiet naramienny pasujący na ramię o obwodzie 22 - 40 cm  
Antypoślizgowe podkładki na podstawie

CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY CONTROLY B07 Miejsce pomiaru ramię

Funkcja A-rhythm – pomocna w wykryciu arytmii

Symbol nieregularnego tętna oznacza, że podczas pomiaru aparat wykrył nierówną pracę serca. W takiej sytuacji wynik pomiaru może odbiegać od typowego ciśnienia krwi. Zaleca się powtórzenie pomiaru. W większości przypadków pojawienie się tego symbolu nie jest powodem do niepokoju. Jednakże, jeżeli symbol ten pojawia się dość regularnie (np. kilka razy w tygodniu przy pomiarze raz dziennie), może świadczyć o arytmii. Zalecamy skonsultowanie się w tej sprawie z lekarzem.

Symbole na wyświetlaczu LCD:

- Skurczowe ciśnienie krwi
- Rozkurczowe ciśnienie krwi
- Symbol pamięci
- Symbol bicia serca
- Symbol wartości średniej
- Symbol wyczerpanych baterii
- Aktualny czas
- Puls
- Symbol połączenia USB
- Symbol nieregularnego bicia serca
- Wskaźnik ruchu ciałem
- Użytkownik B
- Użytkownik A

CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY CONTROLY B07 Model B07

Specyfikacja techniczna Model B07:

Waga: 225,5 g

Wyświetlacz LCD: 60 mm x 40 mm

Wymiary: 118 (dł.) x 110 (szer.) x 52 (wys.) mm

Warunki działania: temperatura: 5°C do 40°C; wilgotność: 15% do 93% RH; ciśnienie atmosferyczne: 70 kPa - 106 kPa

Warunki przechowywania i transportu: temperatura: -25°C do 70°C; wilgotność: 10% do 93% RH; ciśnienie atmosferyczne: 70 kPa - 106 kPa

Metoda pomiaru: oscylometryczna

Czujnik ciśnienia: pojemnościowy

Zakres pomiarowy: 0-280 mmHg;

Puls: 40 do 199 uderzeń na minutę

Zakres ciśnienia mankieta: 0–299 mmHg

Dokładność wyświetlania: 1 mmHg

Dokładność pomiarowa: ciśnienie  $\pm$  3 mmHg / puls  $\pm$  5 %

Źródło zasilania: 4 baterie AAA 1,5 lub zasilacz 5-6V, 600 mA (opcjonalnie)

Akcesoria: uniwersalny rozmiar mankietu o szerokości: 22 - 40 cm

Automatyczne wyłączenie: po 60 sekundach

Certyfikaty:

Standardy urządzenia: Ciśnieniomierz ten został wyprodukowany w zgodzie z europejski-mi standardami dotyczącymi aparatów do pomiaru ciśnienia krwi: EN 1060-1/1995 – EN 1060-3/1997 – EN 1060-4/2004 Kompatybilność elektromagnetyczna: Urządzenie spełnia wymagania międzynarodowego standardu EN 60601-1-2

CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY CONTROLY B07 Kod producenta B07

60-MIESIĘCY bezpłatnego serwisu OD DRZWI DO DRZWI

W przypadku stwierdzenia wady urządzenia zadzwoń pod numer infolinii dystrybutora 801 000 977 i dokładnie opisz zaistniałą usterkę. Serwis ustala czy wymianie podlega cały sprzęt czy tylko uszkodzony element. Podaj serwisantowi szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu: (imię i nazwisko, adres odbioru paczki, nr telefonu), zapakuj sprzęt razem z kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz kartą ZGŁOSZENIA USTERKI. Odebrany sprzęt jest naprawiany i odsyłany pod ten sam adres w terminie do 14 dni.