

ColdHot KIDS 11x12CM KOMPRES ciepły-zimny dla dzieci, 2 sztuki

Cena: 29,50 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	2 szt.
Postać	-
Producent	3M POLAND SP Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Nexcare ColdHot KIDS 11x12CM KOMPRES ciepły-zimny dla dzieci, 2 sztuki

Okład Nexcare ColdHot dla dzieci może być użyty jako zimny lub ciepły okład. Jest idealnym rozwiązaniem dla osób preferujących naturalne, niefarmakologiczne metody terapii. Okład stosowany na zimno pomaga zmniejszyć obrzęk, stan zapalny i ból, np. zęba. Doskonali na ostre urazy (siniaki, skręcenia, drobne guzy) czy krwotok z nosa. Pomaga przy opuchnięciu po wkłuciu oraz ukąszeniu przez owady. Do stosowania podczas gorączki (nie obniża temperatury ciała). Stosowany na ciepło pomaga zmniejszyć skurcze mięśni i ból, uspokaja i relaksuje. Wspiera przy bólach wzrostowych czy brzucha (tylko z powodu napięcia mięśni). Można również korzystać w celu ogrzania dłoni.

Zastosowanie

Do użytku zewnętrznego.

Sposób użycia

Okład może być przygotowany w kuchence mikrofalowej lub zamrażarce według zaleceń: w kuchence mikrofalowej: podgrzewać okład przez maksymalnie 20 sekund na mocy 640 Watt. W ciepłej wodzie: zanurz okład na 60 sekund. Ostrożnie wyjmij i ugniataj by równomiernie rozprowadzić ciepło.

Zawartość opakowania

Kompres żelowy 11 × 12 cm, 2 sztuki.
Pokrowiec z folii i fizeliny, 2 sztuki.

Producent

3M Poland Manufacturing Sp. z o.o.

ul. Kwidzyńska 6,
51-416 Wrocław.