

Corega Tabs tabletki czyszczące do protez 6 tabletek



Cena: 2,70 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	108 tabl.
Postać	tabl.rozpusz.
Producent	F.H.D & I DAMIAN ILMAK
Substancja czynna	-

Opis produktu

Corega Tabs tabletki czyszczące do protez 6 tabletek

Corega tabletki czyszczące do protez posiadają unikalną formułę, która zabija 99,9% bakterii będących przyczyną nieświeżego oddechu w 3 minuty. Usuwają również osad, przebarwienia, a także odświeżają protezę.

Czyszczenie protezy przy użyciu tabletek czyszczących Corega, jako części codziennej higieny, pomaga w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. Tabletki należy stosować regularnie, przynajmniej raz dziennie.

Tabletki czyszczące Corega mają działanie przeciwbakteryjne i dezynfekujące. Używane zgodnie z instrukcją pomagają zapobiegać gromadzeniu się płytki bakteryjnej i chronią przed przebarwieniami. Dzięki łagodnej formule czyszczą bez rysowania powierzchni protezy.

Stosowanie 3-minutowych tabletek do czyszczenia protez zębowych Corega:

Wrzuć jedną tabletkę do naczynia z ciepłą (nie gorącą) wodą, zanurz w niej protezę. Dopilnuj, by była całkowicie zanurzona w roztworze. Pozostaw protezę w roztworze na 3 minuty.

Wyczyść protezę roztworem za pomocą szczoteczki z miękkimi włóknami.

Opłucz protezę pod bieżącą wodą.5. Wylej pozostały roztwór.