

# ELGYDIUM CLINIC Nić z fluorem orzeźwiająca 35m



Cena: 12,20 pln

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	PIERRE FABRE MEDICAMENT POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

## Opis produktu

Elgydium nić dentystyczna z fluorem miętowa orzeźwiająca 35m

Używanie nici dentystycznej wspomaga usuwanie płytki nazębnej.

Właściwości:

- Zaimpregnowana fluorem.
- Wyjątkowo cienka i odporna nić woskowana.
- Miętowy smak: odświeża oddech.
- Długość: 35 m

Pamiętaj!

Nitkowanie zębów, jako element codziennej higieny jamy ustnej, zapobiega powstaniu próchnicy i chorobie dziąseł.

Sposób użycia

1. Zawień końce nitki wokół środkowych palców.
2. Napnij nić dentystyczną pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym, zostawiając ok. 2 cm nici pomiędzy dłońmi.
3. Delikatnie przesuwaj nić pomiędzy zębami. Kiedy dotrzesz do linii dziąseł, zagnij nić wokół zęba na kształt litery C.
4. Delikatnie przesuwaj nić w górę i w dół kilkakrotnie pomiędzy każdym zębem, pamiętając również o zębach tylnych.
5. Uważaj, aby nie zsunąć nitki zbyt szybko na dziąsła.