

KATAREK SÓL FIZJOLOGICZNA DLA NIEMOWLĄT 10x5ml



Cena: 9,90 pln

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-----------------|
| Dawka | - |
| Opakowanie | 10 amp.a 5ml |
| Postać | - |
| Producent | DUNA SP. Z O.O. |
| Substancja czynna | - |

Opis produktu

KATAREK SÓL FIZJOLOGICZNA DLA NIEMOWLĄT 10x5ml

Katarek Roztwór Soli Fizjologiczny NaCl 0,9% 10x5ml

Katerek roztwór soli fizjologiczny (NaCl 0,9%) to wyrób medyczny w klasie IIa. Może być stosowany u niemowląt od pierwszych dni życia, starszych dzieci, a także u osób dorosłych.

Produkt przeznaczony jest przede wszystkim dla niemowląt i dzieci. W opakowaniu znajdujesz 10 wygodnych ampułek o optymalnej pojemności 5ml do jednorazowego zastosowania. Katerek Roztwór soli fizjologiczny to produkt sterylny o wysokiej jakości.

KATAREK SÓL FIZJOLOGICZNA DLA NIEMOWLĄT 10x5ml

Ma wiele zastosowań. Roztworu soli użyjemy do:

inhalacji – lekarze bardzo często przed zapisaniem leków zalecają nebulizację solami fizjologicznymi w przypadku infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych, zapalenia obstrukcyjnego zapalenia oskrzeli, kataru, kaszlu, zapalenia krtani, oskrzeli, astmy oskrzelowej i nieżytów nosa

higienizacji noska – sól fizjologiczna doskonale rozrzedzi zalegającą wydzielinę przedaspiracją – odciążeniem kataru, służy do oczyszczania noska z innych zanieczyszczeń

przemywania i zakraplania oczu dziecka

czyszczenia uszu dziecka

przemywania ran i skaleczeń

KATAREK SÓL FIZJOLOGICZNA DLA NIEMOWLĄT 10x5ml EAN 5905279336131

Sposób użycia:

Oderwij pojedynczą ampułkę od pakietu. Następnie odkręć jej górną część delikatnie przekręcając główkę ampułki w lewo lub prawo. Przed zastosowaniem upewnij się czy po usunięciu główki, końcówka ampułki została gładka bez wystających ostrych zakończeń.

Odchyl głowę do tyłu, a następnie wprowadź końcówkę ampułki do jamy nosowej i lekko naciśnij.

Czynność powtórz dla drugiego otworu nosowego.

KATAREK SÓL FIZJOLOGICZNA DLA NIEMOWLĄT 10x5ml Kod producenta 6131