

KLESZCZ OUT - Przyrząd do usuwania kleszczy



Cena: 18,99 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	ALBERT-POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Kleszcz Out, przyrząd do usuwania kleszczy, 1 sztuka.

Przyrząd służy do usuwania kleszczy z ciała człowieka oraz jadu po ukąszeniach owadów (komarów, pszczoł, szerszeni), żmij, skorpionów. Doskonale sprawdza się przy udzielaniu pierwszej pomocy.

Zastosowanie: do usuwania kleszczy z ciała człowieka.

Sposób użycia: aby przygotować przyrząd do użycia, należy wcisnąć gumowy tłok do oporu. Przyłożyć końcówkę do ciała w miejscu wszczęcia się kleszcza (wprowadzenia jadu). Docisnąć przyrząd do ciała i tak utrzymując docisk, stopniowo, powoli odciągać tłok do odpowiedniej pozycji. Zdezynfekować miejsce ukąszenia środkami odkażającymi.

Ważne wskazówki:

Usunięcia kleszcza może okazać się utrudnione w przypadku wszczęcia się go w miejscach uniemożliwiających wytworzenie próżni np. we włosach.

Nie używać przyrządu na zranionej skórze, w okolicach oczu, zewnętrznych narządach płciowych.

Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wyrób medyczny przeznaczony do samokontroli - posiada oznakowanie CE.

Posiada deklarację zgodności UE.

Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.