

# MULTIdrug Control Test na obecność narkotyków 1 sztuka

Cena: 19,91 pln



## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SILESIA PHARMA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

## Opis produktu

Rodzina Zdrowia Multidrug Control test narkotykowy 1 sztuka

### Wskazania i działanie

Test na obecność narkotyków MultiDrug Control jest szybkim immunochromatograficznym testem do jakościowego wykrywania wielu narkotyków i ich metabolitów w moczu.

Przeznaczony do samodzielnego stosowania.

Test wykrywa obecność w moczu poniższych narkotyków:

kokainy  
marihuany  
amfetaminy  
morfiny  
heroiny  
haszyszu (THC)  
MDMA (Ekstazy)

Szybki w użyciu – wynik w ciągu 5 minut

Dokładny: 99,86%

### Czytelny:

1 linia w obszarze C - stwierdzono obecność narkotyku  
2 linie (w obszarze C i T) - nie stwierdzono obecności narkotyku  
1 linia w obszarze T - wynik nieważny

Opakowanie zawiera:

saszetkę z 1 kasetką testową i pochłaniaczem wilgoci  
1 pojemnik na mocz  
instrukcję używania

### Dawkowanie

Wykonanie testu:

1. Przez 10 sekund zanurz paski testowe pionowo w próbce moczu.
2. Połóż test na płaskiej, czystej i suchej powierzchni.
3. Odczytaj wynik po upływie 3-5 minut od zanurzenia pasków testowych

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

produkt oznaczony znakiem CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej  
produkt zawiera etykietę/ instrukcję w języku polskim  
produkt zawiera informację o deklaracji zgodności UE  
na opakowaniu (etykiecie) produktu oraz w instrukcji używania zawarte jest wyraźne sformułowanie, że wyrób medyczny służy do samokontroli