

# MultiPlast Paski do zamykania ran, sztuczne szwy 6 sztuk



Cena: 6,30 pln

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	6 szt.
Postać	-
Producent	ALIDA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

## Opis produktu

MultiPlast Paski do zamykania ran, sztuczne szwy 6 sztuk  
wyrób medyczny

MultiPlast Paski do zamykania ran przeznaczone do nieinwazyjnego zabezpieczenia i zamykania drobnych ran i skaleczeń. Trwała, a jednocześnie oddychająca włóknina utrzymuje brzegi rany zamknięte, ułatwiając gojenie się rany bez użycia szwów. Długość paska można dostosować w zależności od potrzeb.

### Sposób użycia:

1. Umyj ręce przed zastosowaniem pasków.
2. Oczyszć i zdezynfekuj ranę, następnie ostrożnie osusz. Zadbaj, by miejsce wokół rany było czyste i suche.
3. Wyjmij paski z saszetki.
4. Zamocuj pasek, zbliżając do siebie krawędzie zranionej skóry.  
Nie naprężaj paska. Delikatnie dociśnij, aby pasek dobrze przywarł do skóry.
5. Następnie nałóż kolejne paski, zachowując odstęp ok. 3-5 mm, jednak nie większe niż 1 cm.
6. W celu usunięcia plastra, delikatnie odklej oba końce w kierunku rany.

### Ostrzeżenia:

Paski do zamykania ran sterylne wewnątrz opakowania bezpośredniego. Wyrób sterylny, jeśli opakowanie nie jest uszkodzone. Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania. Wyrób przeznaczony do użytku zewnętrznego. Nie stosować pasków na głębokie i rozległe rany. W przypadku infekcji lub stanu zapalnego, należy skonsultować się z lekarzem przed aplikacją wyrobu. W przypadku wystąpienia podrażnienia, wysięku lub krwawienia z rany, należy usunąć paski i skonsultować się z lekarzem. Przed zastosowaniem pasków u osób chorujących na cukrzycę należy zasięgnąć opinii lekarza. Produkt należy przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Paski zużyć od razu po otwarciu saszetki ochronnej. Każdy poważny incydent medyczny związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i odpowiedniemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Data wydania instrukcji używania: 12.05.2023 r.

Producent: Eurosirel S.p.A.  
Viale Europa, 30 - 20047  
Cusago (MI) Italy

Dystrybutor: ALIDA Sp. z o.o.  
ul. Zwycięzców 42 m.43  
03-937 Warszawa