

# Otovent, zestaw do wyrównywania ciśnienia w przewodzie słuchowym



Cena: 59,60 pln

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	ABIGO MEDICAL AB
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

## Opis produktu

Otovent zestaw do wyrównywania ciśnienia w przewodzie słuchowym

Otovent, 1 zestaw

1 ZESTAW ZAWIERA:

1 RURKA DONOSOWA

5 BALONIKÓW

wyrób medyczny  
niechirurgiczna metoda leczenia wysiękowego zapalenia ucha

Działanie :

potwierdzona klinicznie opcja leczenia z wyboru ujemnego ciśnienia w uchu środkowym, która pomaga uniknąć chirurgicznego zabiegu zakładania rurek wentylacyjnych w błonie bębenkowej ucha pacjenta, nieinwazyjna, w 100% wolny od substancji chemicznych i leków, rekomendowana przez lekarzy laryngologów w ciągu ostatnich 20 lat, wyrównuje ciśnienie w uchu i łagodzi objawy ze strony ucha środkowego, leczenie jest bezbolesne, bez efektów ubocznych, zajmuje niewiele czasu.

Wskazania :

Wyrób medyczny Otovent jest przeznaczony do leczenia ujemnego ciśnienia w uchu środkowym u dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.

Sposób użycia wyrobu medycznego :

Podłączyć balon do końcówki nosowej. Prawą ręką mocno docisnąć okrągłą część końcówki nosowej do prawego otworu nosowego. Palcami lewej ręki zatkać lewy przewód nosowy. Przycisnąć skrzydełko nosa z lewej strony w taki sposób by szczelnie zatkać lewy przewód nosowy.

Głęboko wciągnąć powietrze i zamknąć usta. Nadmuchać balon prawym otworem nosowym, aż osiągnie rozmiar grejpfruta.

Powtórzyć procedurę dla lewego otworu nosowego.

Leczenie jest skuteczne, gdy dziecko odczuwa wzrost ciśnienia i / lub „kliknięcie” w uchu.

Wyrób medyczny Otovent należy stosować 2-3 razy dziennie, aż do całkowitego usunięcia płynu wysiękowego z ucha środkowego.

Uwaga:

Każdy balon można napełniać maksymalnie 20 razy. (wtedy ciśnienie do przedmuchiwania trąbek słuchowych jest skuteczne).

Dzieci mogą używać zestawu Otovent w domu pod nadzorem rodziców.

Chronić od światła i wilgoci.