

Panda Ciśnieniomierz DLA DZIECI 3-12 lat, Sanity AP 1720



Cena: 369,00 pln

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Dawka | - |
| Opakowanie | 1 szt. |
| Postać | - |
| Producent | ALBERT POLSKA SP. Z O.O. |
| Substancja czynna | - |

Opis produktu

Ciśnieniomierz dla dzieci

Ciśnieniomierz DLA DZIECI Sanity® AP 1720 to urządzenie medyczne do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi u dzieci. To pierwszy na polskim rynku ciśnieniomierz automatyczny przeznaczony dla najmłodszych, ponieważ zastosowany sposób pomiaru uwzględnia specyfikę ciśnienia krwi u dzieci.

Ciśnieniomierz DLA DZIECI Jest wyposażony w odpowiednio małe mankiety, których rozmiary są dostosowane do obwodu ręki najmłodszych pacjentów: 15-18 cm oraz 18-22 cm. Urządzenie wykorzystuje nowatorski system podzielonego mankietu (ang. Duo Control Cuff Technology, DCC). Każdy mankiety jest zbudowany z 2 części: górnej (większej) i dolnej (mniejszej) komory powietrza, napełnianych oddzielnie, osobnymi przewodami powietrza. Górna mankiety działa standardowo, powodując ucisk ramienia, natomiast dolna komora służy jako stetoskop do wykrywania fal tętna. Mierzenie ciśnienia odbywa się pomiędzy uderzeniami serca, za pomocą wielu czujników wewnątrz mankiety. Przeznaczony dla dzieci w wieku 3-12 lat.

Ta metoda zapewnia bardzo dokładne odczyty i jest wyjątkowo delikatna, co ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci. Ciśnieniomierz ma przyjazny kształt zwierzątka, co uatrakcyjnia i ułatwia spokojny pomiar.

Jak wykonać pomiar:

Dla uzyskania prawidłowych wyników należy zadbać o prawidłową postawę ciała dziecka. Najlepiej, aby dziecko stabilnie siedziało np. na krześle, ze stopami ułożonymi płasko na podłodze i ramieniem położonym na stole. Ważne jest, aby podczas pomiaru dziecko było spokojne, bez poruszania się i mówienia.

Założyć mankiety jak pokazano powyżej – na lewe lub prawe ramię dziecka, w zależności od zaleceń lekarza. Dolna część mankiety powinna znajdować się ok. 1 cm powyżej łokcia, a mankiety i serce powinny być na tym samym poziomie.

Po wciśnięciu przycisku „START/STOP” mankiety zacznie być napełniany powietrzem. Po zakończeniu pomiaru nastąpi szybkie spuszczenie powietrza z mankiety. Zostanie wyświetlone ciśnienie krwi i tętno, a urządzenie automatycznie zapisze wynik.

Dane techniczne:

Zasilanie: bateria litowa (DC 3,7 V) lub zasilacz prądu zmiennego (wejście: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A, wyjście: 6V, 1A)
Pamięć 200 pomiarów

Rozmiar: 165 mm x 112 mm x 60 mm
Waga: ok. 350 g (bez baterii)

Zawartość opakowania:

Automatyczny, naramienny Ciśnieniomierz dla dzieci Sanity®, model AP 1720
Zestaw dwóch mankietów: XS (15-18 cm) oraz S (18-22 cm)
Bateria litowa
Zasilacz
Instrukcja obsługi w języku polskim

SANITY Ciśnieniomierz automatyczny dla dzieci 1 szt EAN (GTIN) 5907438902775

Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE nr:0197
Posiada deklarację zgodności UE
Zawiera instrukcję obsługi oraz interfejs w języku polskim
Zawiera etykietę w języku polskim