

PASOCARE CLASSIC PLUS plaster do cięcia 1m x 6cm



Cena: 4,99 pln

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Dawka | - |
| Opakowanie | 10 szt. |
| Postać | plast. |
| Producent | PASO-TRADING SP. Z O.O. |
| Substancja czynna | - |

Opis produktu

PASOCARE CLASSIC PLUS plaster do cięcia 1m x6cm

ZASTOSOWANIE:

Opatrywanie drobnych ran i skaleczeń. Niejałowe, jednorazowego użytku.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Do cięcia – umożliwia dobór rozmiaru plastra do wielkości rany
- Z opatrunkiem – nieprzywierający do rany
- Elastyczny – dostosowuje się do kształtu ciała
- Oddychający – przyspiesza gojenie ran
- Hipoalergiczny - zmniejsza ryzyko uczuleń

SPOSÓB UŻYCIA:

- Oczyść i osusz ranę .
- Wyjmij plaster z opakowania bezpośredniego.
- Odetnij odpowiedni odcinek plastra, dopasowując do wielkości rany.
- Naklej plaster na skórę, kierując opatrunek bezpośrednio na ranę .
- W celu usunięcia plastra, chwycić za jego krawędź i pociągnąć wzdłuż skóry, aż do całkowitego odklejenia.
- Zmieniaj plaster codziennie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Nie stosować, jeśli opakowanie bezpośrednie plastra jest uszkodzone.
- Wyrób do użytku jednorazowego – ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem.

Po użyciu wyrób traktować jako odpad medyczny – potencjalne źródło zakażenia.

PRZECIWWSKAZANIA:

Nie stosować na rany silnie sączące.

ZASTOSOWANIE:

Opatrywanie drobnych ran i skaleczeń. Niejałowe, jednorazowego użytku.

Producent: PASOCARE