

# PASOCARE na odciski z kwasem salicylowym 8 sztuk



Cena: 6,65 pln

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	8 szt.
Postać	plast.
Producent	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

## Opis produktu

Pasocare Specialist Plus Plastry na odciski z kwasem salicylowym 20 x 72 mm, 8 sztuk

### Wskazania:

Plastry na odciski z kwasem salicylowym Pasocare Specialist Plus to wyrób medyczny przeznaczony do opatrywania i wsparcia gojenia odcisków na skórze.

### Właściwości:

Plastry na odciski Pasocare Specialist Plus minimalizują ból podczas chodzenia i chronią przed otarciami dzięki piankowemu pierścieniowi, który otacza odcisk. Kwas salicylowy dodatkowo zmiękcza odcisk i ułatwia jego usunięcie.

Plastry Pasocare Specialist Plus są elastyczne i odporne na wilgoć. Doskonale dopasowują się do kształtu stopy, zapewniając komfort podczas użytkowania.

### Stosowanie:

- Przed użyciem plastra należy dokładnie oczyścić i namoczyć odcisk, a następnie wysuszyć skórę.
- Nałożyć plaster, umieszczając centralny podkład bezpośrednio na odcisku.
- Pozostawić plaster skórze do czasu, aż sam zacznie się odklejać. Maksymalny czas aplikacji to 48 godzin.
- Czynność powtarzać do momentu, aż odcisk będzie odchodził samoistnie.
- Usunąć odcisk w ciepłej kąpieli solnej lub mydlanej.

### Ważne informacje:

Plastrów nie należy stosować w przypadku uczulenia na kwas salicylowy. W przypadku osób z zaburzeniami krążenia, chorych na cukrzycę i neuropatię zasięgnąć porady lekarza.

Producent: PASOCARE