

## PASOCARE plastry hydrokoloidowe na pęcherze MIX 6 sztuk



Cena: 11,70 pln

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	6 szt.
Postać	plast.
Producent	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

## Opis produktu

Plastry na pęcherze mix  
6 sztuk

Ochronne plastry na pęcherze,  
Zawierają hydrokoloid, który działa jak nowa skóra,  
Za sprawą amortyzacji i małego tarcia przynoszą ulgę w bólu,  
Plastry absorbują wydzielinę w przypadku otwartych pęcherzy oraz tworzą optymalne środowisko dla gojenia się ran,  
Z łatwością dopasowują się do kształtu stopy oraz chronią pęcherz przed zabrudzeniem i wilgocią.

Hydrokoloid działa jak nowa skóra, która dzięki amortyzacji ucisku i minimalizacji tarcia przynosi ulgę w bólu. Plaster absorbuje wydzieliny w przypadku otwartych pęcherze oraz tworzy optymalne środowisko do gojenia się rany.

Zastosowanie:

Opatrywanie pęcherzy na skórze.

Sposób użycia:

Usunąć papier ze strony przylepnej plastra.

Naklej plaster na oczyszczoną i osuszoną skórę, tak aby hydrokoloid zakrywał pęcherz.

Usuń papier z wierzchniej strony plastra.

Pozostaw plaster na skórze nawet przez kilka dni, do momentu, aż sam zacznie się odklejać. Aby uniknąć bólu podczas zdejmowania plastra, najpierw odwiń jego krawędzie (folię), a następnie zdejmij warstwę hydrokoloidu. Jeśli pęcherz pękł zastosuj łagodny środek antyseptyczny.

Środki ostrożności:

Nie stosuj jeśli opakowanie bezpośrednio wyrobu jest uszkodzone  
Nie stosuj plastra: na krwawiące rany, zainfekowane rany, poparzenia trzeciego stopnia  
Nie stosuj ponownie zużytego plastra – wyrób jednorazowego użycia  
Jeśli okolice skóry stają się czerwone i spuchnięte, niezwłocznie zaprzestań stosowania i skonsultuj się z lekarzem  
Przechowuj wyrób poza zasięgiem dzieci

Przeciwwskazania:

W przypadku cukrzycy lub problemów z krążeniem, przed zastosowaniem skonsultuj się z lekarzem. Nie stosuj plastra w przypadku nadwrażliwości na produkt lub którykolwiek z jego składników: zwłaszcza polizobuten i karboksymetylocelulozę.

Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.  
Posiada deklarację zgodności UE  
Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim