

PASOCARE plastry hydrokoloidowe na pęcherze na PIĘTY 6 sztuk



Cena: 11,94 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	6 szt.
Postać	plast.
Producent	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Plastry na pęcherze na piętę
6 sztuk

Właściwości plastrów hydrokoloidowych:

- łagodzą ból
- przyspieszają gojenie
- zabezpieczają przed otarciami pęcherzy
- 100% pokrycie hydrokoloidem
- wilgotny mikroklimat

Zastosowanie:

Opatrywanie pęcherzy na piętach.

Sposób użycia:

Usunąć papier ze strony przylepnej plastra.
Naklej plaster na oczyszczoną i osuszoną skórę, tak aby hydrokoloid zakrywał pęcherz.
Usuń papier z wierzchniej strony plastra.

Pozostaw plaster na skórze nawet przez kilka dni, do momentu, aż sam zacznie się odklejać. Aby uniknąć bólu podczas zdejmowania plastra, najpierw odwiń jego krawędzie (folię), a następnie zdejmij warstwę hydrokoloidu. Jeśli pęcherz pękł zastosuj łagodny środek antyseptyczny.

Środki ostrożności:

Nie stosuj jeśli opakowanie bezpośrednio wyrobu jest uszkodzone
Nie stosuj plastra: na krwawiące rany, zainfekowane rany, poparzenia trzeciego stopnia
Nie stosuj ponownie zużytego plastra – wyrób jednorazowego użycia
Jeśli okolice skóry stają się czerwone i spuchnięte, niezwłocznie zaprzestań stosowania i skonsultuj się z lekarzem
Przechowuj wyrób poza zasięgiem dzieci

Przeciwwskazania:

W przypadku cukrzycy lub problemów z krążeniem, przed zastosowaniem skonsultuj się z lekarzem. Nie stosuj plastra w przypadku nadwrażliwości na produkt lub którykolwiek z jego składników: zwłaszcza polizobuten i karboksymetylocelulozę.

Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.
Posiada deklarację zgodności UE
Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim