

PASOSLEEP STANDARD Plastry przeciw chrapaniu 10 sztuk



Cena: 18,33 pln

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Dawka | - |
| Opakowanie | 10 szt. |
| Postać | - |
| Producent | PASO-TRADING SP. Z O.O. |
| Substancja czynna | - |

Opis produktu

PASOSLEEP Wake Up Rested Plastry przeciw chrapaniu Standard, 10 szt.

Zastosowanie:

Plastry przeciw chrapaniu swoje przewidziane zastosowanie uzyskują dzięki „mechanicznemu działaniu”, rozszerzają nozdrza ułatwiając oddychanie i tym samym pomagają zmniejszyć chrapanie oraz łagodzą dyskomfort spowodowany przekrwieniem błony śluzowej nosa. Stosować przed snem.

Jak stosować plastry przeciw chrapaniu PASOSLEEP Wake Up Rested?

Ostrożnie oczyścić i osuszyć skórę nosa.

Wyjmij plaster z opakowania bezpośredniego i odklej część ochronną.

Naklej plaster na skórę, w poprzek nosa i przyciskając palcami odczekaj kilka sekund, aż plaster przylegnie mocno do skóry.

W celu usunięcia plastra chwyć za jego krawędź i usuwaj powoli wzdłuż skóry, aż do całkowitego odklejenia. Czynność odklejania najlepiej wykonuj w trakcie mycia twarzy lub biorąc prysznic ciepłą wodą.

Rozmiar plastrów:

56 x 18 mm.

Środki ostrożności:

Wyrób tylko do użytku jednorazowego, zewnętrznego. Nie stosować, jeśli opakowanie bezpośrednie plastra jest uszkodzone. Stosować wyłącznie na oczyszczoną, nieuszkodzoną i niepodrażnioną skórę. Stosować nie dłużej niż 8 godzin. Nie stosować u dzieci poniżej 5 roku życia. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry natychmiast przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza. Plaster nie będzie skuteczny w przypadku trudności w oddychaniu związanych z niedrożnością nosa spowodowaną np. infekcją górnych dróg oddechowych, problemami anatomicznymi, takimi jak skrzywienie przegrody nosowej czy bezdech senny. Każdy poważny incydent

należy zgłosić do producenta i właściwego organu.

Podmiot odpowiedzialny: Paso-trading Sp. Z o.o.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.

Posiada deklarację zgodności UE

Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Producent: PASOCARE