

PIC ThermoGel kompres ciepły-zimny 10x10cm 1 sztuka



Cena: 14,33 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 op.
Postać	-
Producent	SIROWA POLAND SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

PIC ThermoGel kompres ciepły-zimny 10x10cm 1 sztuka

Kompres żelowy wielokrotnego użytku do terapii ciepłem i zimnem. Posiada przyjemny w dotyku pokrowiec. Kompres można nakładać bezpośrednio na bolącą część ciała. Idealnie sprawdzi się przy drobnych urazach i bólach, takich jak ból zęba, nadgarstka.

idealny na drobne urazy i bóle: ból zęba, nadgarstka
do terapii zimnem i ciepłem
kompres w przyjemnym w dotyku pokrowcu
można nakładać bezpośrednio na bolącą część ciała
wielokrotnego użytku
żelowa formuła pozwala na lepsze dopasowanie nawet po wyjęciu z zamrażarki
żel nie zamarza
nadaje się do zastosowania u dzieci

Wskazania

Cieptolecznictwo zalecane jest w przypadku lumbago, rwy kulszowej, skurczów mięśni, zeszywnieniu stawów i bólach reumatycznych, bólach brzucha.

Aplikacje na zimno są wskazane we wszystkich stanach zapalnych, w szczególności zwichnięciach, nadwyrężeniach, napięciach, bólu zębów, ukąszeniach owadów i oparzeniach, oparzeniach słonecznych, oparzeniach przez meduzy oraz oparzeniach pokrzywą.

Sposób użycia

Terapia zimnem: schłodzić kompres w zamrażalniku przez minimum 2 godziny.

Terapia ciepłem: ogrzać kompres w gorącej wodzie (maksymalnie do 60oC) przez około 10 minut lub podgrzać przez 6 minut w kuchenke mikrofalowej, zanurzając kompres całkowicie w naczyniu z wodą (maksymalnie 300 W).

Opakowanie

Kompres żelowy w rozmiarze 10 x 10 cm, 1 sztuka

Producent
SIROWA POLAND SP. Z O.O.
ul. Poselska 11,
03-931 Warszawa