

# PIC VedoClear Termometr elektroniczny z miękką końcówką, DUŻY WYŚWIETLACZ

Cena: 17,49 pln



## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SIROWA POLAND SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

## Opis produktu

PIC VedoClear Termometr elektroniczny z miękką końcówką, DUŻY WYŚWIETLACZ

Termometr elektroniczny do bezpośredniego pomiaru temperatury ciała. Dokładny, nietłukący się z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem.

- Elastyczna i wodoodporna końcówka (sonda)
- Duży i bardzo czytelny ekran
- Dźwiękowy alarm gorączkowy (dla temp. powyżej 37,4°C)
- Czas trwania pomiaru: pod pachą 2 min, oralnie /rektalnie 1 min
- Sygnal dźwiękowy na koniec pomiaru
- Funkcja zapisu ostatniego pomiaru
- Automatyczne wyłączenie
- Wysoka precyzja – walidacja kliniczna
- Dożywotnia gwarancja

Wskazania:

Wyrób medyczny PIC VedoClear termometr elektroniczny z dużym wyświetlaczem przeznaczony jest do pomiaru temperatury ciała pod pachą, metodą rektalną i oralną.

Sposób użycia wyrobu medycznego:

Włączyć termometr za pomocą przycisku ON/OFF. Na wyświetlaczu najpierw przez dwie sekundy pojawi się symbol kontroli wyświetlacza. Następnie na dwie sekundy pojawią się w kolejności: ostatnio wykonany pomiar, wskazanie samokalibracji 37°C oraz symbol oznaczający rozpoczęcie pomiaru. Sygnal dźwiękowy zasygnalizuje, że termometr zakończył pomiar. Jeśli temperatura osiągnie >37,8°C zostanie aktywowany sygnal alarmowy.

Pomiar pod pachą (około 3 minuty)

Umieścić końcówkę termometru pod pachą i przycisnąć ramię do piersi. Upewnić się, że pachy jest sucha i że ubrania nie utrudniają prawidłowego umieszczenia końcówki termometru w dole pachowym.

Pomiar rektalny (około 1 minuty)

Delikatnie włożyć termometr do odbytu na głębokość około 15 mm. W razie odnotowania jakiegokolwiek oporu, należy natychmiast zaprzestać.

Pomiar w ustach (około 1 minuty)

Umieścić termometr pod językiem i zamknąć usta. Oddychać przez nos, aby nie wpłynąć na pomiar.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

Aby w prawidłowy sposób wykonać pomiar temperatury, konieczne jest prawidłowe umieszczenie termometru.

Unikać spożywania ciepłych lub zimnych napojów, aktywności fizycznej, kąpieli w wannie lub pod prysznicem oraz palenia w ciągu 15 minut poprzedzających wykonanie pomiaru.

Do czyszczenia termometru używać miękkiej ściereczki zanurzonej w alkoholu lub w powszechnie stosowanym środku czyszczącym.

Przyrząd nie jest wodoodporny, nie zanurzać w wodzie.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Status: wyrób medyczny

Dystrybutor w Polsce: SIROWA POLAND Sp. z o.o.