


PIC VedoEco Plus termometr szklany lekarski bezrtęciowy

Cena: 25,99 pln

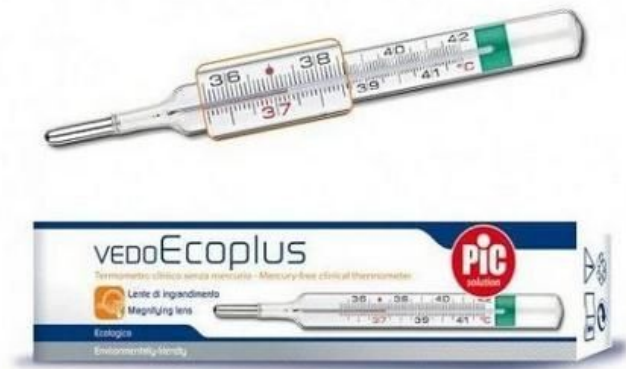

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SIROWA POLAND SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

PIC VedoEco Plus Termometr bezrtęciowy szklany lekarski z lupą łatwy do wstrząśnięcia

Tradycyjny, szklany termometr bezrtęciowy z podziałką. Nie zawiera rtęci, tylko stop metali, który zachowuje ciekłą postać. Nadaje się do użytku dla całej rodziny.

Właściwości termometru PIC VedoEco Plus:

- Termometr lekarski
- Tradycyjny pomiar
- Czytelna podziałka
- Wypełniony nietoksycznym stopem metali: galu, indu i cyny
- Zakres pomiaru: 35,5°C - 42°C (dokładność -0,15/+0,1°C)
- Czas trwania pomiaru: pod pachą 3 min, oralnie/rektalnie 1 min
- Przezroczysty plastikowy futerał z bardzo dużym szkłem powiększającym
- Przyrząd ułatwiający strząśnięcie termometru w celu zbitcia temperatury
- Dożywotnia gwarancja

Jak dokonać pomiaru temperatury ciała?

Przed rozpoczęciem pomiaru należy upewnić się, że słupek wypełniony stopem metali wskazuje wartość niższą niż 36°C.

Umieścić termometr w miejscu, w którym chcemy dokonać pomiaru: pomiar pod pachą/ pomiar ustny/ pomiar rektalny.

Po upływie około 4 minut termometr wskaże temperaturę ciała i możliwy będzie jej odczyt.

Po pomiarze ciecz wskaźnikowa musi wrócić do temperatury poniżej 36°C. W tym celu należy umieścić termometr w odpowiedniej końcówce, która znajduje się w etui, zwracając uwagę, aby dokładnie docisnąć termometr do samego końca. Następnie chwycić końcówkę i wstrząsać szybkimi i rytmicznymi ruchami, aby ciecz opadła poniżej pierwszej numerowanej podziałki.

POMIAR USTNY

Czas trwania pomiaru: co najmniej 4 minuty, temperatura normalna: 37°C. Umieścić końcówkę termometru pod językiem, oddychając przez nos, aby nie zmienić temperatury.

POMIAR REKTALNY

Czas trwania pomiaru: co najmniej 4 minuty, temperatura normalna: 37,5°C.

Umieścić delikatnie końcówkę termometru w odbycie na głębokość nie większą niż 2 cm, zatrzymując się natychmiast po napotkaniu jakiegokolwiek oporu. Nie używać wazeliny.

POMIAR POD PACHĄ

Czas trwania pomiaru: co najmniej 4 minuty, temperatura normalna: 36,7°C. Upewnić się, że dół pachowy jest suchy, następnie umieścić końcówkę termometru w zagłębieniu pod pachą i docisnąć ramię do tułowia.

CE 0197

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.
Posiada deklarację zgodności UE
Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.