

# Protefix Krem mocujący Premium Mocowanie 47g

Cena: 14,90 pln



## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	47 g
Postać	-
Producent	FARMACOL LOGISTYKA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### Protefix Krem mocujący Premium Mocowanie 47g

Protefix Premium Mocowanie to krem przeznaczony do mocowania protez zębowych całkowitych i częściowych. Preparat gwarantuje komfort mocowania protezy zębowej, uszczelnia i zapobiega przedostawaniu się drobinek jedzenia. Wyrób medyczny może być stosowany na mokrą protezę zębową, dzięki elastycznej warstwie między dziąsłami a protezą. Zawarta w składzie preparatu witamina E pielęgnuje dziąsła. Krem posiada przyjemny łagodny i świeży smak mięty.

### Zastosowanie

Krem przeznaczony do mocowania protez zębowych całkowitych i częściowych.

### Sposób użycia

- Nałożyć krem na protezę mokrą lub suchą w odstępach (krótkimi odcinkami).
- Protezę z kremem założyć i przycisnąć na parę sekund.
- Odczekać 5 minut przed przyjmowaniem posiłku.
- Po użyciu starannie zamknąć tubę.

### Składniki

Cellulose Gum (27%), Caldum/sodium PVMMA Copolymer (26%), Paralfinum Liquidum, Petrolatum, Silica, Chamomilla Recutita, Toxopheryl Acetate, Commiphora Myrrha, Salvia officinalis, Menthy, Lactate, Mentha Crispa, 14720.

### Cechy produktu

- skutecznie uszczelnia,
- trzyma na mokro,
- pielęgnuje dziąsła,

posiada świeży miętowy smak.

#### Ważne wskazówki

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ewentualne resztki kremu mocującego można łatwo usunąć ze szczęki, żuchwy i podniebienia za pomocą wacika zwilżonego olejem jadalnym.

#### Ostrzeżenia

Nie należy stosować jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników kremu mocującego.

Nie stosować w przypadku podrażnionej lub zmienionej chorobowo błony śluzowej jamy ustnej.

#### Zawartość opakowania

47 g

#### Producent

Queisser Pharma GmbH&Co KG  
Export Department  
Schleswiger Strasse 74  
24941 Flensburg

#### Dystrybutor

Queisser Pharma Poland  
Domaniewska 39  
02-672 Warszawa