

Protefix, podściółki mocujące do żuchwy, 30 sztuk

Cena: 17,99 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 szt.
Postać	-
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Protefix, podściółki mocujące do żuchwy, 30 sztuk

Stosowanie podściółek mocujących jest wskazane w przypadku szczególnie trudnych warunków mocowania protezy w jamie ustnej pacjenta – na przykład przy zaniku wyrostka zębodołowego u pacjentów w podeszłym wieku.

Zastosowanie: mocowanie protezy całkowitej.

Sposób użycia: podściółkę mocującą przyciąć do wielkości protezy, zanurzyć na ok. 10 sekund w letniej wodzie, nałożyć na oczyszczoną, wilgotną protezę i przycisnąć.

Składniki: alginian sodowy, włókna wiskozowo- polipropylenowe.

Ważne wskazówki:

Przy stosowaniu podściółek powinno się je zmieniać po każdym posiłku (po dokładnym oczyszczeniu protezy), ponieważ podściółka pochłania łatwo barwniki pokarmowe i rozmiękczony pokarm. Podściółki mocujące są dostępne w opakowaniach po 30 sztuk.

Wytwórca:

Queisser Pharma GmbH&Co KG
Export Department
Schleswiger Strasse 74
24941 Flensburg

Kontakt w Polsce:

Polconsult
ul. J. Kubickiego 17/9
02-954 Warszawa.

