

Sanity BasicTemp AP 3216 Termometr elektroniczny

Cena: 11,49 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	ALBERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Substancja czynna	-

Opis produktu

Sanity BasicTemp AP 3216 Termometr elektroniczny

Termometr cyfrowy, Sanity Basic, model 3216

Cyfrowy termometr BasicTemp umożliwia szybki pomiar temperatury ciała w sposób dotykowy. Model posiada wskaźnik zużycia baterii, funkcję automatycznego wyłączenia oraz automatycznego zapisu ostatniego wykonanego pomiaru.

Przed i po każdym użyciu należy oczyścić termometr miękką szmatką i alkoholem izopropylowym rozcieńczonym wodą lub umyć w zimnej wodzie z mydłem. Nie moczyć przez dłuższy okres czasu. Nie sterylizować przez gotowanie w autoklawie, gazowo lub parowo.

do produktu dołączona jest instrukcja w języku polskim
produkt posiada certyfikat CE

Sposób użycia:

Mierzenie temperatury w ustach: Umieść czujnik temperatury termometru pod językiem najbliżej jak to możliwe przy kieszonce ciepła.
Mierzenie temperatury pod pachą: Przetrzyj skórę pod pachami suchym ręcznikiem i umieść końcówkę termometru pod ramieniem, tak aby czujnik temperatury dotykał skóry. Utrzymuj termometr prostopadle do ciała. Umieść rękę na piersi tak, aby końcówka czujnika była dobrze pokryta przez ramię. Mierzenie temperatury w odczynie: Należy zastosować smar rozpuszczalny w wodzie na końcówkę (czujnik temperatury). Delikatnie włóż końcówkę termometru (maksymalnie 1/2) do odczynie.

Miejsce pomiaru:

pod pachą 2-3 minuty,

w jamie ustnej 1 minuta,

rektykalnie 1 minuta

Chociaż ogólnie przyjęta „normalna” temperatura to 37.0°C to odczyt odczyty temperatury mogą różnić się od 36.1°C do 37.2°C i nadal mogą być uważane za „normalne”. Na zmiany temperatury mogą mieć wpływ różne czynniki, np. ćwiczenia, palenie tytoniu, jedzenie i picie. Twoja temperatura jest niższa rano niż po południu. Zróżnicowanie poziomu temperatury może też być uzależnione od położenia punktu odczytu temperatury. Choć temperatura mierzona w ustach dopowiada wytycznym opisanym wcześniej, temperatura odbytu jest zwykle 0.5C wyższa. Odwrotnie, temperatura pod pachą będzie 0.5C niższa.