

# SutriHeal Forte 10% maść do gojenia ran 2g



Cena: 12,99 pln

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	2 g
Postać	maść
Producent	VERCO
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### SutriHeal Forte 10% maść 2g

SutriHeal to wyrób medyczny w postaci maści, który przeznaczony jest do gojenia zakażonych i niezakażonych ran na drobne skaleczenia, zranienia i otarcia. SutriHeal zawiera jedyną na polskim rynku formułę kwasów żywicznych i lignanów o potwierdzonej skuteczności przeciwbakteryjnej<sup>1</sup>. Nie zawiera antybiotyku.

SutriHeal Forte 5% stosowana jest w celu przyspieszenia gojenia zakażonych i niezakażonych ran, jak:

- Rany ostre (skaleczenia, zadrapania, zabiegi chirurgiczne i ortopedyczne),
- Rany powierzchniowe (problemy podologiczne, otarcia, pęknięcia naskórka, powierzchniowe uszkodzenia naskórka),
- Rany przewlekłe (odleżyny, oparzenia, zespół stopy cukrzycowej, owrzodzenia podudzi).

### Jak działa SutriHeal Forte?

Skuteczność maści SutriHeal Forte opiera się na biologicznej aktywności składników, posiadających wielokierunkowe działanie. Nie zawiera antybiotyku i nie wywołuje oporności.

### Skład

Skład maści oparty jest na unikalnej 4-składnikowej formule kwasów żywicznych i lignanów:

- Diterpenoidy (m.in. Kwas abietynowy, dehydroabietynowy)
- Kwas p-kumarowy
- Lignany
- Podłoże maści – makrogol (PEG) 400 i 3350, glicerol

### Jak stosować SutriHeal Forte?

Obszar skóry ze zmianami należy w miarę możliwości oczyścić przed nałożeniem maści SutriHeal – w tym celu można użyć np. produktu SutriSept w Solution Płyn na rany.

Maść SutriHeal należy nałożyć bezpośrednio na ranę w postaci cienkiej warstwy (1-2 mm).

Obszar rany może zostać odkryty lub można go zabezpieczyć dowolnym opatrunkiem.  
Po każdej zmianie opatrunku należy ranę oczyścić z pozostałości maści, używając np. SutriSept Płyn.  
Aplikację maści można powtarzać 1 lub 2 razy dziennie do całkowitego zagojenia się rany. Unikać dostania się maści do oczu lub ust.

#### Ostrzeżenia

Wyrób medyczny należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.  
Przed użyciem należy przeczytać instrukcję używania.  
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.  
Nie stosować przy stwierdzonej alergii na żywice.  
Nie stosować u osób ze stwierdzoną umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek.  
Unikać dostania się maści do oczu lub ust.

Podmiot odpowiedzialny: VERCO