

SutriSept Hydrożel na rany 100 ml



Cena: 63,40 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	100 ml
Postać	-
Producent	VERCO
Substancja czynna	-

Opis produktu

SutriSept, hydrożel na rany 100ml

Produkt przeznaczony jest do oczyszczania, dekontaminacji, irygacji i nawilżania przewlekłych i zakażonych ran oraz oparzeń 1 i 2 stopnia. Hydrożel wypełnia powierzchnię między opatrunkiem a raną, dzięki czemu izoluje powierzchnię rany od środowiska zewnętrznego i tworzy powłokę ochronną. Dzięki utrzymaniu stabilnego środowiska w ranie skraca proces gojenia.

Hydrożel zapobiega przyleganiu mikroorganizmów i utrzymuje czystość i odpowiednią wilgotność rany i jej okolic. Minimalizuje również przywieranie opatrunku do rany, dzięki czemu jego wymiana jest niemal bezbolesna.

Zastosowanie: żel do oczyszczania ran i skóry, irygacji, nawilżania ran, nawilżania opatrunków medycznych przed założeniem, nawilżania i dekontaminacji opatrunków przed usunięciem z rany, eliminacji patogennych mikroorganizmów z opatrunków.

Sposób użycia: całą ranę i jej okolice należy dokładnie oczyścić. Oczyszczoną ranę należy pokryć produktem na rany, a następnie odpowiednio zabandażować.

Składniki: Biguanid poliaminopropylu (poliheksanid) 0,1% i substancje pomocnicze, w tym Poloksamer 188.

Przeciwwskazania: produkt nie jest odpowiedni do stosowanie w przypadku operacji chrząstek hialinowych i aseptyce operacji stawów, w uchu środkowym i wewnętrznym, nie można go również aplikować do oczu. Nie stosować jeśli u pacjenta rozpoznano lub podejrzewa się nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu. Nie stosować razem z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, mydłami, kremami, olejkami, enzymami itp.

Ważne wskazówki:

Wyłącznie do użytku zewnętrznego na skórę.

Produktu nie wolno podawać we wlewach dożylnych ani iniekcjach.

Nie stosować jeśli plomba lub tubka pod zakrętką zostały uszkodzone.

Po otwarciu zużyć w ciągu 8 tygodni.

Chronić przed słońcem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dystrybutor:
Verco S.A.
ul. Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 lok. 6U,
01-015 Warszawa