

Test ciążyw BABY BOOM strumieniowy PASO, wczesna ciąża 1 szt

Cena: 3,99 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Test ciążyw strumieniowy wczesna ciąża Baby boom

Przedstawiamy test ciążyw strumieniowy Baby Boom – najbardziej niezawodny i dokładny test strumieniowy na rynku.

Uzyskaj dokładne wyniki w zaledwie kilka minut, dzięki wysokiej czułości testu, stężenie hCG od 25 mIU/ml. Potwierdź ciążę już po 7 dniach od poczęcia, badania laboratoryjne potwierdzają dokładność testu powyżej 99%.

Nasz test strumieniowy został zaprojektowany z myślą o łatwości użycia, wystarczy skierować pasek absorpcyjny bezpośrednio pod strumień moczu.

Test ciążyw strumieniowy wczesna ciąża Baby boom

Sposób użycia:

Przed wykonaniem testu zaczekaj, aż test osiągnie temperaturę pokojową.

Ostrożnie wyjmij test strumieniowy z saszetki foliowej.

Przytrzymaj test i zdejmij nasadkę w celu odsłonięcia paska absorpcyjnego.

Skieruj pasek absorpcyjny w dół; trzymaj pasek absorpcyjny pod strumieniem moczu, przez co najmniej 5 sekund lub umieść go na co najmniej 20 sekund w zebranej próbce moczu, by został dokładnie zmoczony.

Zakryj z powrotem test nasadką i poczekaj na pojawienie się kolorowych linii.

Po 5 minutach odczytaj wynik testu. W zależności od stężenia hCG w moczu, pozytywny wynik może pojawić się już po 40 sekundach, mimo to odczekaj 5 minut w celu potwierdzenia wyniku. Wyniku nie należy odczytywać później, gdyż może być on błędny.

Test przeznaczony jest do jednorazowego użycia. Po odczytaniu wyniku wyrzuć test do pojemnika na śmieci, traktując go jako potencjalne źródło zakażenia.

CE 0123

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wyrób medyczny przeznaczony do samokontroli - posiada oznakowanie CE.

Posiada deklarację zgodności UE.

Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.

Producent: PASOCARE