

Test Ciążowy Strumieniowy Zyskaj Zdrowie 1 sztuka



Cena: 4,99 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	DIAGNOSIS S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

ZYSKAJ ZDROWIE TEST CIĄŻOWY STRUMIENIOWY x 1 sztuka

Test przeznaczony do samodzielnego wykrywania obecności gonadotropiny kosmówkowej w moczu. Cechuje się wysoką czułością, reagującą nawet na niewielkie stężenie tego hormonu oraz dokładnością powyżej 99%. Kontrolę należy przeprowadzić po co najmniej 7 dniach od ostatniego stosunku.

W skład opakowania wchodzi:

plastikowy panel testowy w zapieczętowanej folii;
instrukcja użycia;
pochłaniacz wilgoci.

sposób użycia

Wyciągnąć test z foliowego opakowania bezpośrednio przed wykonaniem pomiaru. Zdjąć plastikową nasadkę, nie dotykając palcami paska absorpcyjnego. Umieścić pole testowe bezpośrednio w strumieniu moczu i pozostawić na ok. 5 sekund. Ewentualnie zebrać mocz do czystego i jałowego pojemnika, po czym zamoczyć w nim 2/3 paska absorpcyjnego na ok. 10 sekund. Zakryć pole plastikową nasadką, położyć test na płaskiej powierzchni i odczytać wynik po 5 minutach.

Wynik pozytywny: linia C i linia T.

Wynik negatywny: pojedyncza linia C.

Wynik nieważny: brak linii lub pojedyncza linia T.

Po odczytaniu wyników test wyrzucić. Zmiany w obrębie paska absorpcyjnego, pojawiające się po upływie dłuższego czasu od wykonania pomiaru należy zignorować, bowiem są efektem zachodzących przemian chemicznych. Intensywność koloru linii nie stanowi kryterium oceny.

Pobieranie próbki moczu:

Przed pierwszym dniem spodziewanej miesiączki: należy użyć świeżego, porannego moczu.

Po upływie pierwszego dnia spodziewanej miesiączki: możliwość zastosowania moczu z dowolnej pory doby.

Dystrybutor

Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin