


Test PSA, do wykrywania antygenu prostaty, 1 sztuka

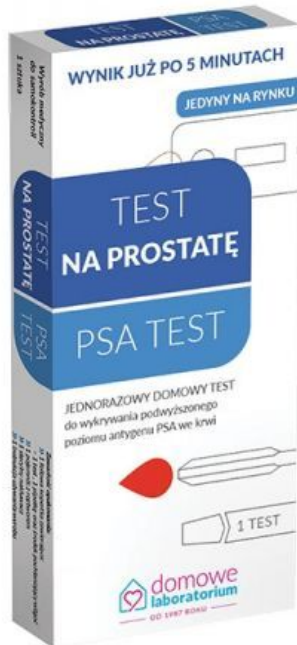

Cena: 18,80 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

HYDREX Test na prostatę PSA TEST, do wykrywania podwyższonego poziomu antygenu PSA we krwi, 1 sztuka

Dokładność: 88% ogólną zgodności z innymi metodami.

Materiał: krew.

Wynik: po 10 minutach.

Produkt marki Domowe Laboratorium jest wyrobem medycznym do samokontroli. Domowy test do wykrywania podwyższonego poziomu antygenu PSA we krwi.

PSA Test pozwala na łatwą diagnostykę stanu prostaty, której przerost może prowadzić do przykrych konsekwencji zdrowotnych. Produkt stanowi kompletny zestaw do samodzielnego przeprowadzenia badania. Samą diagnostykę można przeprowadzić w domu. Pozwala ona wykryć podwyższone stężenie antygenu PSA, a wynik jest komunikowany za pomocą łatwych do odczytania barwnych linii. Opakowanie zawiera:

1 aluminiową szczelnie zamkniętą kopertkę, w której znajduje się: 1 płytka testowa, 1 plastikowa pipetka i 1 środek pochłaniający wilgoć,

1 pojemnik z zakraplaczem zawierający 1 ml diluentu,

1 sterylny nakłuwacz do nakłucia palca,

instrukcję obsługi w języku polskim.

Jak wykonać badanie:

Przygotuj nakłuwacz do pracy. Wciśnij pomarańczowy element aż do usłyszenia charakterystycznego dźwięku, który sygnalizuje jego gotowość do pracy.

Po „aktywowaniu” nakłuwacza usuń pomarańczowy element, wykręcając go w prawo lub lewo.

Przyłóż nakłuwacz do opuszka palca i naciśnij przycisk zwalniający sprężynę. Ostrze jest w pełni bezpieczne, po wykonaniu zadania

schowa się do obudowy.

Wykonaj lekki masaż opuszka, aby uformować dużą kroplę krwi.

Zbliż pionowo ustawioną pipetkę do kropli krwi i, nie wykonując żadnych nacisnięć, pobierz próbkę. Krew pod wpływem sił kapilarnych sama zacznie wpływać do zbiornika. Jeżeli jej ilość jest zbyt mała i nie sięga poziomu czarnej kreski, należy powtórzyć masaż opuszka i uzupełnić braki.

Próbkę krwi z pipety ostrożnie wprowadź do okienka testowego.

Po całkowitym wchłonięciu kropli krwi, odkręć niebieską nakrętkę pojemnika z diluentem i zaaplikuj w to samo miejsce 4-5 pełnych kropli płynu. Wynik odczytaj po upływie pełnych 10 minut. Uwaga. Wyniki odczytane po czasie dłuższym niż 15 minut nie są wiarygodne i nie należy brać ich pod uwagę.

W zestawie:

* Test na prostatę - 1 szt.

* Polska instrukcja obsługi

Ten produkt posiada oznaczenie CE o numerze jednostki notyfikowanej NUMER 1434

Ten produkt posiada deklarację zgodności UE - spełnia wymogi Unii Europejskiej.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Do produktu jest dołączona etykieta i/lub instrukcja obsługi w języku polskim.

Producent:

VEDA.LAB

Dystrybutor:

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k.