

URS 10 Test do badania ogólnego moczu 2 sztuki



Cena: 13,10 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	2 szt.
Postać	-
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Substancja czynna	-

Opis produktu

DOMOWE LABORATORIUM URS 10 TEST OGÓLNE BADANIE MOCZU - 2 SZTUKI

TEST DO OZNACZANIA 10 PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW MOCZU

Wykrywa 10 parametrów:

Glukoza,
Bilirubina,
Ketony,
Ciężar właściwy,
Krew,
pH,
Białko,
Urobilinogen,
Azotyny
Leukocyty.

Działanie:

Wyrób medyczny URS 10 Test umożliwia przeprowadzenie kompleksowej analizy moczu obejmującej aż 10 różnych parametrów badawczych, do których należą: glukoza, bilirubina, ciała ketonowe, ciężar właściwy, krew, pH, białko, urobilinogen, azotyny, leukocyty.

Dołączona do testu skala barwna pozwala dokładnie określić poziom odstępstwa uzyskanych wyników od normy.

Test URS 10 stanowi doskonałe narzędzie do wykrywania stanów zapalnych układu moczowego, a także problemów z nerkami czy wątrobą.

Regularne badanie moczu zalecane jest wszystkim osobom:

Stosującym diety odchudzające lub alternatywne sposoby odżywiania,
Korzystającym z publicznych basenów,
Pacjentom z przewlekłymi chorobami nerek,
Kobietom stosującym dopochwową antykoncepcję,
Dzieciom z podwyższoną temperaturą o niekreślonym źródle infekcji.
Za jego pomocą można badać zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Sposób użycia:

Pobierz próbkę porannego moczu do czystego i suchego pojemnika.
Zanurz test w moczu.
Pierwszy odczyt dokonujemy po 30 sekundach, rozpoczynając od glukozy i zmierzając po kolei w górę. Na interpretacje i zaznaczenie wyników na skali mamy maksymalnie 2 minuty.

Zawartość opakowania:

2 folie kopertki, każda zawierająca: 1 test oraz środek pochłaniający wilgoć.
2 skale barwne.
1 instrukcja używania wyrobu.

Uwagi:

W celu poprawnego przeprowadzenia badania koniecznie należy się zapoznać z załączoną do opakowania instrukcją obsługi.
Test służy wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Opakowanie z testem należy przechowywać w temperaturze 2-30°C. Nie zamrażać.
Nie używać testu po dacie ważności umieszczonej na opakowaniu.
Nie używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone, ponieważ wilgoć z powietrza mogła uszkodzić test.
Test jest przeznaczony tylko do jedнокrotnego użycia.
Zużyty test usunąć jak każdy inny odpad domowy.
Test przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent: Hydrex Diagnostics Sp. z o.o., Sp. k., ul. T. Zana 4, Warszawa.

CE 1434

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wyrób medyczny przeznaczony do samokontroli - posiada oznakowanie CE.

Posiada deklarację zgodności UE.

Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.