

Zestaw VACUTEST próżniowy do pobierania próbki moczu



Cena: 5,99 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt. (zestaw)
Postać	pojemnik
Producent	EL-COMP CEZARY KOSTUCH
Substancja czynna	-

Opis produktu

Vacutest zestaw próżniowy do pobierania próbki moczu

Zestaw Vacutest to próżniowy zestaw przeznaczony do pobrania próbki moczu do sterylnego pojemniczka, a następnie umieszczenie materiału drogą próżniową w probówce.

Pojemnik na moczu oraz probówka są idealnie dobrane. Po włożeniu probówki do dedykowanego w pojemniku otworu następuje samoczynne wypełnienie. Metoda próżniowa wypełnienia probówki zapewnia sterylność procesu i gwarantuje pełną wiarygodność badania. Do laboratorium pacjent dostarcza tylko probówkę.

Sposób użycia

W celu uzyskania próbki do badania laboratoryjnego, przed użyciem należy dokładnie umyć ręce i części intymne. Założyć rękawiczki jednorazowe. Otworzyć wieczko odkręcając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Odłożyć wieczko górną powierzchnią do dołu na czystą powierzchnię. Nie dotykać wewnętrznej powierzchni pojemnika i wieczka.

Pobrać próbkę moczu. Pojemnik powinien zostać napełniony do 3/4 pojemności. Szczelnie dokręcić wieczko w kierunku ruchu wskazówek zegara.

Delikatnie wstrząsnąć próbką przed pobraniem jej do probówki. Częściowo unieść folię ochronną (nie zdejmować jej całkowicie).
WEWNĄTRZ ZNAJDUJE SIĘ IGŁA, NIE WKŁADAĆ PALCA!

Włożyć probówkę. Delikatnie nacisnąć. Probówka musi pozostać zanurzona do momentu, aż się napełni (ustanie przepływ).

Wyjąć probówkę i ponownie dokładnie nakleić folię ochronną.

Probówkę z pobranym moczem delikatnie potrząsnąć, ok. 8-10 razy. Do laboratorium zanieść tylko probówkę.

Ostrzeżenia

Produkt jednorazowego użytku. Stosować zgodnie z przeznaczeniem.

Zawartość:

Zestaw Vacutest zawiera:

sterylny pojemnik na mocz 120 ml,

sterylną probówkę 9 ml,

instrukcję użytkowania

Producent / Podmiot odpowiedzialny: EL-COMP

Pozwolenie: CE*